

شماره ۴ آمی‌کوویس‌ناپارس

(خبرنامه پوست و زیبایی) مرداد و شهریور ۱۴۰۰

فصل تابستان است سایه ای می جویم

میانه تابستان و گرمای امرداد و شهریور رسیدن طبیعت به اوج و کمال خویش است.

تو گویی سال‌ها از بهار گذشته و درختان برگ‌های تازه و نو خویش را در زیر آفتاب سوزان به سبز تیره و گل‌های خود را به میوه‌های شیرین بدل کرده‌اند و اکنون ایستاده‌اند در برابر خورشید و سایه افکنده‌اند بر جان زمین و در زیر پایشان، کودکان باز یگوش را سهمی از خنکی سایه‌هاست.

کودکانی که مثالی در خشان از شادابی و طراوت‌اند تا روزگار جوانی‌شان که بهاری در پیش رویشان است.

و چه بسیار از ما که دلتنگ روزگار جوانی خویش و آنهمه طراوت و شادابی و درخششی از اعتماد به نفس هستیم.

اما بهار را می‌توان ماندگار کرد و جوانی را زمانی طولانی‌تر و زیباتر بخشید.

آری می‌توان!

آنگاه که تکنولوژی در جست و جوی یافتن راهی برای آرزوهای ماست و آنروز که به ثمر می‌رسد و هدیه‌ای از علم و آرزوهایمان را در پیش رویمان قرار می‌دهد.

اکنون می‌توان بهار جوانی را ماندگار کرد و شادابی را در آینه مدام دید می‌توان در تابستان هم چون بهار جوانه زد!

و آمیکو شما را به جوانه زدن در هر فصلی نوید می‌دهد!

جوانه‌هایی از جوانی و به ماندگاری فصل‌ها و سال‌های پیش رویتان.



برخی دیگر از افتخارات، ابداعات و مقالاتی که از ایشان در ژورنال های معتبر بین المللی به چاپ رسیده در ادامه آمده است :

- اخذ چهار دوره جایزه جشنواره رازی به عنوان محقق و پژوهشگر برتر
- ثبت هفت اختراع در زمینه پوست و مو، جوانسازی، زخم و درمان اسکار آکنه
- بیش از ۲۸۰ مقاله ISI و Pub Med در زمینه پوست، مو، جوانسازی، ترمیم زخم و طب بازسازی
- مبدع روش سابسینژ با اندولیفیت دایود ۱۴۷۰ برای نخستین بار در دنیا که در مجله JCD انگلیس به چاپ رسیده است
- مبدع متد سل تراپی در درمان طاسی برپایه استفاده از سلول های بنیادی مو
- **نفر نخست اندولیفیت و اندولیزر دنیا؛**
- نخستین درماتولوژیست اندولیفیت اندولیزر که مبدع روش درمان اسکار آکنه، پف زیر چشم، بلفاروپلاستی غیر تهاجمی و لیفت نان سرجیکال صورت که برای اولین بار در دنیا به اسم ایشان در مجلات ISI و پاب مد از جمله GCD بنام ایشان نمایه شده
- بیش از ۸۰۰ پرونده انجام اندولیزر پلک، افتادگی صورت، غبغب، پف زیر چشم و...
- تحقیق و تولید پانسمان های نوین در درمان زخم های دیابتیک، دیستروفیک اپیدرمولایسز بولوزا و سوختگی برای نخستین بار.
- مبدع متد درمانی سابسینژ با کانول با تیم تحقیقاتی همراه جهت درمان آکنه اسکار برای اولین بار در دنیا با ۱۸ مرتبه رفرائنس دهی پژوهشگران خارجی در مجلات معتبر علمی ISI و Pub Med.
- تحقیق و تولید انبوه نخستین محصول سلولی کشور در زمینه پوست با نام رینودرم با همکاری شرکت سل تک فارمد
- درمان قطع پای دیابتی با متد نوین سل تراپی برای نخستین بار در دنیا.
- تولید ارگانوئید موی انسان به صورت آزمایشگاهی برای نخستین بار در ایران (در مرحله کار آزمایشی بالینی اولیه و کمیته اخلاق).
- کشت و تکثیر همزمان فیبروبلاست و کراتینوسیت برای ترمیم زخم های ناشی از سوختگی و اسکار سالکو سل تراپی جهت درمان ویتیلیگو
- استفاده از سلول های بنیادی در مال پایلای فولیکول (کشت سلول های بنیادی و تولید مو) برای نخستین بار (در فاز حیوانی کار آزمایشی بالینی اولیه و کمیته اخلاق).
- استفاده از سلول های بنیادی چربی SVF و متد ترکیبی ابداعی در حوزه جوانسازی پوست و درمان طاسی و ریزش.
- مبدع روش هایی نوین در پیوند مو با بیش از حدود هفت هزار پرونده انجام پیوند مو.
- مصاحبه مجله اشپرنگر آلمان با ایشان در زمینه پیوند مو که به زبان آلمانی و انگلیسی به چاپ رسیده است.



مختصری از زندگی
پرافتخار علمی
پروفسور محمد علی
نیلفروش زاده

Professor
of Dermatology
in Tehran
University
of Medical
Sciences

استاد محمد علی نیلفروش زاده پزشک فوق تخصص پوست و مو تحصیلات خود را با پزشکی عمومی آغاز کرد. پس از دوره رزیدنتی و اخذ مدرک تخصصی پوست و مو و بورد تخصصی، کاندید دوره فوق تخصصی در نیوکاسل انگلستان شدند و دوره فلوشیپی خود را در لیزر، جراحی پوست و پیوند مو به اتمام رساندند سپس دوره تکمیلی فلوشیپی پوست و پیوند مو را در کانادا گذرانده و پس از اخذ مدرک فوق تخصصی، تجربیات علمی خود را در کانادا، انگلیس و کشورهای اروپایی ارتقا دادند. ایشان اکنون با سمت علمی استاد تمام درماتولوژی، رییس مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس کار گروه طب باز ساختی ترمیم و پوست، ریاست سابق انجمن متخصصین پوست ایران و دبیر فعلی این انجمن و رییس کلینیک فوق تخصصی پوست و مو جردن مشغول به فعالیت هستند.

فیلم آموزشی؛ وبینار You Choose

در این وبینار دکتر Will Kirby و تیم پشتیبانی مارکتینگ مشتریان Cynosure در مورد بازاریابی کلینیک زیبایی از طریق شبکه های مجازی با تمرکز بر Instagram و برنامه های وفادار سازی مشتریان صحبت می کنند. با مشاهده این ویدئو شما ابتدا با برنامه ریزی تولید محتوای Instagram برای جذب مخاطب واقعی، انواع تبلیغ و اهداف استفاده از آنها و نکاتی در مورد کمک گرفتن از اینفلوئنسر ها برای سرعت بخشید به برنامه خود آشنا می شوید. همچنین در ادامه خارج از بحث فضای مجازی برنامه هایی برای وفادار سازی مشتریان و پیشنهادهایی برای تشکیل و عضوگیری باشگاه مشتریان بررسی شده است.

به نشانی اینترنتی روبرو بروید <https://bit.ly/2V8QJvO>

The Biggest Impact...

Reaching out to influencers does not have to be complicated! It can be as easy as sending a direct message through one of the social media platforms or researching patients that schedule with you. Some other effective ways to be able to meet influencers are through networking events and PR outreach.

The important thing is not to get discouraged if you don't hear back! That's why we identify a market with multiple people!

CYNOSURE UNIVERSITY

Cynosure University



Cynosure University یک پلتفرم آموزشی آنلاین جدید است که توسط کمپانی ساینشور امریکا در اختیار پزشکان و متخصصان زیبایی سراسر دنیا قرار گرفته است. این مجموعه آکادمیک به گونه ای طراحی شده است که بهترین پشتیبانی را برای موفقیت پزشکان در به کارگیری جدیدترین پروسه های زیبایی و درمانی فراهم کند و کتابخانه ای از منابع آموزشی را در اختیار شما قرار می دهد که در هر زمان قابل دسترسی است. این منابع حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد بهترین روش های زیبایی - درمانی، اطلاعات بالینی، نکات و ترفندهای بازاریابی، دمو و کاربری محصولات ساینشور و موارد دیگر است. شما با مراجعه به وبسایت ساینشور www.cynosure.com می توانید علاوه بر دسترسی به این بانک اطلاعاتی، جهت شرکت در کلیه وبینار ها و برنامه های آموزشی آتی به راحتی ثبت نام کنید.




ساینشور همواره به موفقیت شما متعهد هست.

جوان سازی با لیزر کیوسوییچ Nd:YAG فرکشنال

این مقاله با هدف بررسی اثر دستگاه لیزر کیوسوییچ فرکشنال Helios III در سال ۲۰۱۹ توسط دکتر Madhuri Agarwal در کلینیک Yavana Aesthetics هند نوشته شده و در ژورنال بین المللی WILEY به چاپ رسیده است. در این مقاله اثر بخشی لیزر کیوسوییچ با طول موج Nd:YAG به صورت فرکشنال بر روی جوانسازی صورت طی تحقیقی بر روی ۲۵۲ نفر با تایپ های پوستی ۳ تا ۶ بررسی شده است. جامعه آماری استفاده شده در این تحقیق نماینده بسیار مناسبی برای در نظر گرفتن تایپ های پوستی مردم آسیا است. پارامترهای استفاده شده در این تحقیق شامل استفاده از لیزر کیوسوییچ Nd:YAG با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر، میانگین انرژی ۵۰۰-۳۰۰ میلی ژول، فرکانس ۷ هرتز و عرض پالس ۸ نانوثانیه است که در ۶ جلسه درمانی با فاصله زمانی ۲ هفته، مورد استفاده قرار گرفته است.

در تمام جلسات، درمان انجام شده بدون دوره نقاهت بوده و هیچگونه علائمی از هایپوپیگمنتیشن و یا هایپر پیگمنتیشن حتی در پوست های حساس گزارش نشده است. از جمله مهم ترین دلایل افزایش ایمنی در تحقیق، استفاده از دستگاه کیوسوییچ با قابلیت فرکشنال است. استفاده از تکنولوژی فرکشنال، سبب افزایش عمق نفوذ لیزر شده و به دلیل محافظت از برخی نقاط پوست، کاهش ریسک هایپوپیگمنتیشن و هایپر پیگمنتیشن را به همراه خواهد داشت. اهمیت این موضوع در حالی است که در بسیاری از مطالعات صورت گرفته در زمینه جوانسازی با لیزر های کیوسوییچ با طول موج Nd:YAG نرخ بالایی از عوارض جانبی از جمله PIH در میان تایپ های پوستی رایج مردم آسیا مشاهده شده است. شکل زیر تفاوت کیوسوییچ های غیر فرکشنال و کیوسوییچ فرکشنال را به خوبی بیان می کند. نکته بسیار مهم در این شکل وجود عمق نفوذ یکسان در اسپات های هر شات لیزر است که می تواند اثربخشی یکسانی در تمام نواحی پوست را بر آورده سازد. این تحقیق نشان می دهد لیزر کیوسوییچ Nd:YAG فرکشنال گزینه بسیار مناسبی برای جوان سازی در انواع تایپ های پوستی بدون ایجاد آسیب به بافت پوست است.

اثرگذاری لیزر کیوسوییچ با طول موج Nd:YAG برای جوانسازی به این صورت است که از طریق ایجاد آسیب گرمایی کنترل شده به لایه درم پوست بدون ایجاد عوارض جانبی در لایه اپی درم موجب بهبود ساختار پوست می شود. طول موج لیزر Nd:YAG سبب ایجاد تغییر در پروتئین های کلاژن در درم پاپیلاری و درم رتیکولار می شود. نتایج این تحقیق پس از پایان دوره ۶ جلسه ای درمان، نشان دهنده بهبود Texture پوست، روشن شدن آن و همچنین Toning پوست خود را نشان داد. در پایان جلسات اول الی سوم درمانی این تغییرات به سرعت مشاهده شده و در جلسات چهارم الی ششم این تغییرات به مرور افزایش یافته و پایدار تر شدند.

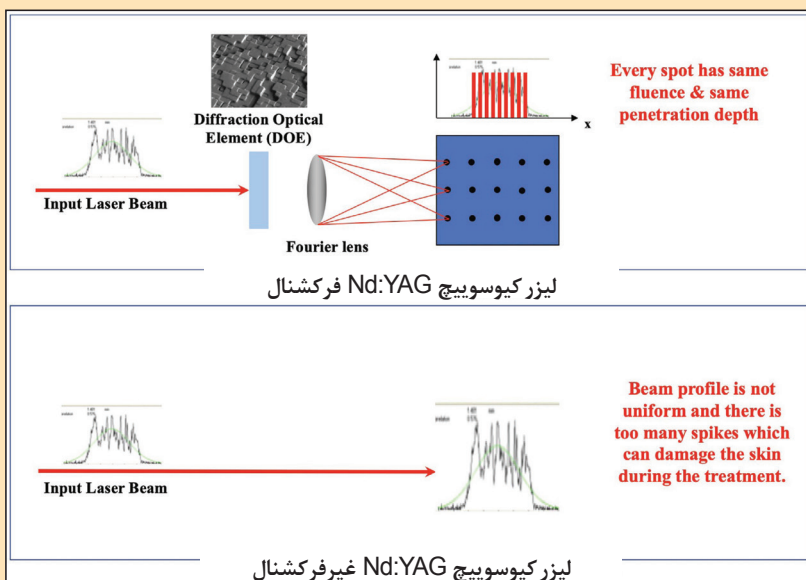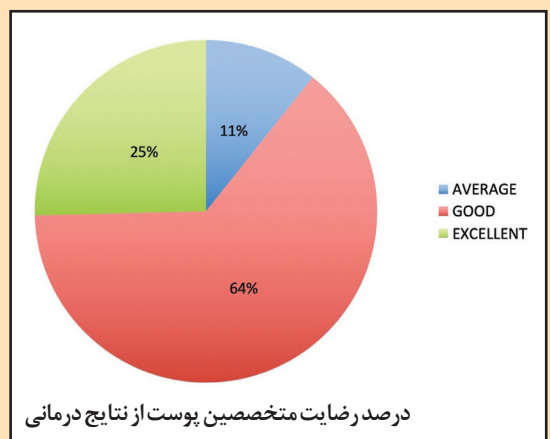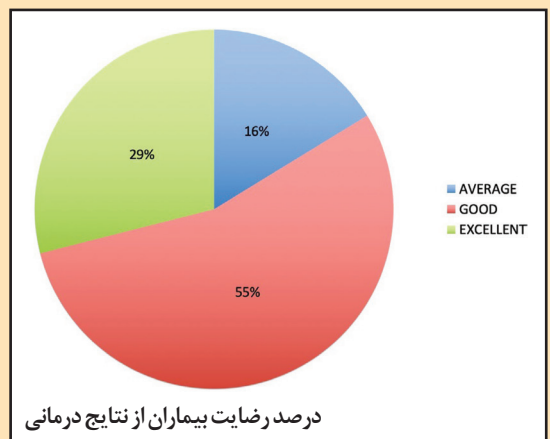

هلیوس

تنها لیزر جوانساز با متد 4G

لیفتینگ

کانتورینگ

کلاژن سازی

تونینگ

4G



LASEROPTEK

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)


HeliosIII نخستین و تنها ستاره کیوسوییچ فرکشنال هیچ رنگ و نقشی ماندنی نیست!

باتوجه به گسترش تحقیقات بر روی اثرگذاری دیگر طول موجها و همچنین افزایش تعداد رنگهای مورد استفاده در تاتوها، لیزرهای کیوسوییچ در طول موجهای دیگری از جمله ۵۳۲، ۵۸۵، ۶۵۰ و ۱۰۶۴ نانومتر نیز به این عرصه افزوده شدند. طول موج ۱۰۶۴ نانومتر برای از بین بردن تاتوهای تیره در رنگهای سیاه، قهوه ای و آبی تیره در تایپهای پوستی ۱ تا ۵، طول موج ۵۳۲ نانومتر برای رفع تاتوهای روشن از جمله زرد، نارنجی و قرمز در تایپهای پوستی ۱ تا ۵، طول موج ۵۸۵ نانومتر برای رفع تاتوهای آبی، بنفش، ارغوانی و ۶۵۰ نانومتر برای تاتوهای سبز رنگ مورد استفاده قرار می گیرند.

دستگاه کیوسوییچ HeliosIII دارای چهار طول موج ۱۰۶۴، ۵۳۲، ۵۸۵ و ۶۵۰ نانومتر است و امکان درمان انواع تاتوها با رنگهای مختلف را فراهم می سازد. علاوه بر این، دستگاه HeliosIII نخستین و تنها کیوسوییچ فرکشنال است. تکنولوژی فرکشنال در این دستگاه سبب افزایش عمق نفوذ لیزر و اثربخشی بهتر آن و هم چنین کاهش ریسک آسیب به پوست می شود. دیگر ویژگی مهم این دستگاه تکنولوژی RTP (Real Twin Pulse) است که با تقسیم هرپالس به دو پالس با فاصله ۱۰۰ میکروثانیه، سبب کاهش درد بیمار و کاهش ریسک اسکار در حین افزایش انرژی می شود.

استفاده از تاتو از زمانهای گذشته تا به امروز بسیار رایج بوده است. تاتوها به پنج دسته Professional, Amateur, Cosmetic, Medical و Traumatic تقسیم می شوند. نوع تاتو ارتباط مستقیمی با میزان اثر بخشی لیزر در از بین بردن آن دارد. از دیگر فاکتورهای مهم در از بین بردن تاتوها رنگ، محل قرارگیری، سن و تایپ پوستی است. برای مثال تاتوهای Amateur ممکن است به ۳ تا ۶ جلسه درمانی و تاتوهای Professional تا ۲۰ جلسه نیاز داشته باشند. تکنولوژی لیزرهای کیوسوییچ برای از بین بردن تاتوها طراحی شدند. ویژگی اصلی این لیزرها کاهش عرض پالس در مقیاس نانو ثانیه است. عرض پالس بسیار کم این لیزرها با ایجاد اثرات فوتواکوستیک در ذرات پیگمانته تاتوها، سبب شکسته شدن آن ها می شود. این فرآیند سبب تحریک پاسخ التهابی بدن به این ذرات شده که موجب از بین رفتن آنها توسط ماکروفاژها و در نهایت جذب شدن آن توسط سیستم لنفاوی می شود. از این رو تکنولوژی کیوسوییچ به صورت کاملاً انتخابی می تواند درمان موثری را برای رفع انواع تاتوها بدون آسیب رساندن به دیگر بافت ها از جمله پوست و موها فراهم سازد.

استفاده از لیزرهای کیوسوییچ Ruby برای از بین بردن تاتو نخستین بار در سال ۱۹۶۵ گزارش شده است. پس از آن

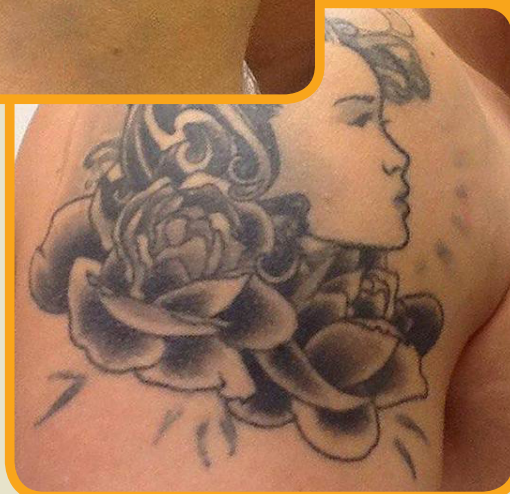



نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پوست و لیزر دبی
با حضور قدرتمند شرکت آمیکو

درخشش ستاره‌های تکنولوژی در غرفه آمیکو

با منبع لیزر الکساندرایت به نام دستگاه **Picosure** جهت رفع مقاوم ترین تاتو های تیره و رنگی در کمترین تعداد جلسات معرفی گردید. همچنین شرکت آمیکو در بخش تازه‌های تکنولوژی نمایشگاهی خود جدیدترین نسل دستگاه‌های کیوسوئیچ فرکشنال و لانگ پالس تحت عنوان دستگاه **HeliosIII** از کمپانی معتبر **Laseroptek** کره جنوبی که در تمام شاخه‌های لیزر های زیبایی دارای تاییدیه سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) است، اقدام به معرفی این تحول نوین در سیستم‌های کیوسوئیچ خدمت پزشکان و میهمانان نمایشگاهی خود کرده است. همچنین شرکت آمیکو مفتخر به حضور گرم پزشکان محترم کشور عزیزمان در نمایشگاه بین المللی پوست و لیزر دبی بوده است.

علمی باعث می‌شود محیطی ایده‌آل برای متخصصان و پزشکان در این زمینه، برای توسعه و تقویت همکاری‌های موجود با همتایان خود از سراسر جهان فراهم شود. از این رو شرکت آمیکو به عنوان یکی از بزرگترین و پیشروترین شرکت‌های تجهیزات پزشکی خاورمیانه در ارائه خدمات، تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین در حوزه پوست با قدرت هر چه بیشتر و با افتخار میزبان پزشکان و میهمانان شانزدهمین دوره کنفرانس جهانی پوست و لیزر دبی بوده است.

در بخش کارگاهی غرفه شرکت آمیکو دستگاه‌های کمپانی **Cynosure** امریکا بزرگترین تولید کننده تکنولوژی‌های برتر در صنعت لیزر پزشکی نظیر دستگاه **Icon** با رویکرد جوانسازی ۳۶۰ درجه و همچنین اولین و تنها دستگاه لیزر پیکوسکند دنیا

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پوست و لیزر دبی نمایشگاهی بسیار مهم و پیشرو در زمینه پزشکی و سلامت پوست در خاورمیانه و حوزه شمال آفریقا به شمار می‌آید. این نمایشگاه رویدادی بی نظیر است که در مرکز همایش‌ها و کنفرانس‌های دبی، امارات متحده با حضور ۱۱۰ سخنران مشهور و ۳۶۰ شرکت معتبر بین المللی در تاریخ ۶ الی ۸ جولای ۲۰۲۱ (۱۵ الی ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۰) برگزار گردید.

نمایشگاه پوست و لیزر دبی فرصتی فوق‌العاده برای تمامی متخصصان این شاخه پزشکی است تا دانش و تجربیات خود را در زمینه مراقبت‌های پوستی و جدیدترین تکنولوژی‌های این بخش از طریق کلاس‌های متنوع، کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های تخصصی بالا ببرند. به علاوه برنامه‌های





گفت و گو با دکتر طناز فخیم،
متخصص بیماری های پوست و مو
درباره ویژگی های منحصر به فرد
دستگاه لیزر HeliosIII

**بهترین نتیجه درمان
با کمترین ریسک!**

بهترین نتایجی که از لیزر HeliosIII گرفتم
درمان های ترکیبی بوده است

● خانم دکتر لطفا خودتان را معرفی کنید.

سلام عرض می کنم خدمت تمامی دوستانی که این مطلب را مطالعه می کنند بنده دکتر طناز فخیم هستم متخصص بیماری های پوست و مو و دارای برد تخصصی بیماری های پوست از دانشگاه علوم پزشکی ایران و نزدیک به ۱۰ سال است که در این حیطه فعالیت می کنم. در حال حاضر در کلینیک جردن در حال فعالیت هستم.

● از چه زمانی با تکنولوژی کیوسوئیچ آشنا شدید؟

حدوداً از سال ۹۰ با تکنولوژی کیوسوئیچ آشنایی دارم و فعالیت می کنم. دستگاه لیزر کیوسوئیچ که از آن استفاده می کنم دستگاه HeliosIII ساخت کمپانی LaserOptek کره جنوبی و دارای تأییدیه FDA آمریکا از جمله دستگاه هایی است که متخصصین پوست نامدار بسیاری در حال استفاده از آن بوده و مورد توجه افرادی که در حوزه Cosmetic فعالیت می کنند قرار گرفته است.

پکیج استاندارد دستگاه HeliosIII طول موج های متفاوتی را ساطع می کند از جمله آن دی یاک (Nd:YAG) و کی تی پی (KTP) و دارای ۵ مد متفاوت کاری ۱۰۶۴ و ۵۳۲ و ۱۰۶۴ و RTP ۵۳۲ و Free Running است. به دلیل وجود همین ویژگی ها در کلینیک های برتر دنیا از این دستگاه برای طیف گسترده ای از درمان ها استفاده می شود.

● از نظر شما ویژگی های متمایز کننده HeliosIII چه مواردی است؟

به عقیده من یکی از ویژگی های جذاب و کاملاً متمایز کننده این دستگاه مد RTP است که توسط متخصصین کاربرد زیادی دارد. اگر بخواهم اختصاراً توضیح دهم این مد مخفف (Real Twin Pulse) است. با استفاده از این مد شما می توانید با خیال آسوده و با انرژی بالا درمان را انجام دهید و هیچ گونه اسکاری باقی نگذارید.

ویژگی بسیار حائز اهمیت دیگر قدرت و دوام باور نکردنی دستگاه است در اصطلاح فنی دستگاه به شدت Stable است.

ویژگی دیگر دستگاه، نتایج درمانی بی نظیری است که پس از درمان مشاهده می کنیم که با دیگر دستگاه ها بسیار متفاوت بوده و همواره بازخورد بی نظیر زیبا جویان را در پی داشته است.

قدرت دیگر این دستگاه که خاطر نشان می کنم بحث درمان فول کالر تاتو است یعنی تمامی تئوها با هر رنگی می توانند از روی پوست به راحتی برداشته شوند.

دستگاه دارای هندپیس های بسیار سبک بوده و کار با آن بسیار ساده و در عین حال USER FRIENDLY است. حتی با تعداد بالای بیمار استفاده از دستگاه به هیچ عنوان خسته کننده نیست.

منحصر به فرد ترین ویژگی دستگاه Fractional بودن آن است یعنی امواج را به صورت Fractional (یکسان بودن سطح انرژی و عمق) در تعداد نقاط زیاد ساطع می کند. که این ویژگی باعث عمق نفوذ بیشتر در لایه درم و باعث کاهش ملموس عوارضی مانند سوختگی و PIH و اسکار می شود.

● عمده تجربیات شما از دستگاه HeliosIII چه بوده است؟

عمده تجربه من با این دستگاه در پروسه جوان سازی و رفع تاتوها در لایه های مختلف پوست بوده است. دستگاه در پروسه جوان سازی باعث تحریک کلاژن سازی، شفاف سازی، قوام و لیفت پوست می شود و مراجعین همیشه دارای سطح بالایی از رضایت در این فرایندها بوده اند زیرا نتایج به سطح توقع و خواسته های بیمار بسیار نزدیک است.

من درمان های متفاوتی مانند ملاسما، کک و مک، PIH، لک، Agesspot، لیفت صورت و گردن، درمان آکنه های فعال و قارچ ناخن را با استفاده از دستگاه HeliosIII انجام می دهم. بهترین نتایجی که از لیزر HeliosIII گرفتم درمان های ترکیبی بوده است.

به طور مثال با توجه به اینکه لیزر دارای تکنولوژی Fractional است و تاثیر خاصی روی پوست دارد، همراه لیزرهای اربیوم یا Co² ... از پیلینگ های سالیسیلیک اسید و مزو های جوان ساز و روشن کننده برای Lightening پوست به منظور بالا بردن جذب استفاده می کنم که نتیجه فوق العاده ای به جای می گذارد. هم چنین برای درمان PIH و درمان های دیگر نتایج بسیار رضایت بخش است. یکی دیگر از تجربیات من در کار با دستگاه HeliosIII درمان خال های مادرزادی بوده که نتایج آن خیره کننده است و باعث بالا بردن اعتماد به نفس بیمار می شود. بیماری که از حجم زیادی کرم های پوشاننده استفاده می کرده است می تواند پس از درمان بدون استفاده از آن کرم ها در جمع ظاهر شود. در کنار سایر روش ها با توجه به تحریک و القا ساخت کلاژن علاوه بر جوان سازی در درمان اسکار لک و آکنه نیز تاثیر بسزایی دارد.

● کیس های مورد نظر معمولاً جوان هستند یا پیر؟

کیس های مراجعه لیزر کیوسوئیچ کلینیک بسیار هستند و هر روز مراجعین زیادی برای رفع تئو و جوان سازی به ما مراجعه می کنند. از آن جایی که رفع تاتوهای مختلف چه روی پوست صورت و چه پوست بدن بسیار دارای اهمیت است و تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان قصد پاک کردن آن را دارند، مراجعه کننده در طیف وسیع و گسترده بدون محدودیت سنی به وفور مشاهده می شود. مراجعه بیمارانی که دلیل نتیجه خوبی که پس از درمان می گیرند مستمر و همراه با رضایت و اطمینان بسیار بالاست.

● معمولاً درمان های مختلف HeliosIII در چند جلسه انجام می شود؟

بسیار بستگی به شرایط بیمار، مساحت تئو و عمق جوهر در پوست (درمال یا اپیدرمال) دارد اما معمولاً جلسات درمانی را ۳ تا ۵ جلسه در نظر می گیریم که نسبت به دیگر دستگاه ها نتیجه بهتر درمان در زمان کمتر را دارد. ممکن است برای بعضی کیس های خاص جلسات درمانی بیشتری در نظر گرفته شود.

● در پایان اگر نکته ای هست، با ما و خوانندگان در میان بگذارید

امروزه در بازار برای حذف تاتو و جوان سازی دستگاه های بی کیفیت و بدون مجوز بسیاری با قیمت های بسیار پایین در بازار دیده می شود که استفاده از آنها هم برای پزشک و هم برای بیمار بسیار خطرناک است. امیدوارم تمامی همکاران و افرادی که در حیطه زیبایی و سلامت مردم فعالیت می کنند از این موضوع آگاه شوند و با انتخاب متد، دستگاه و برند معتبر بهترین نتیجه درمان را با کمترین ریسک خطر برای بیمار ارائه دهند.

دستگاه لیزر هلیوس، جوانسازی به روش 4G

