

شماره ۲۳

آمیکوویسنایارس

خبرنامه پوست و زیبایی / تیر ۱۴۰۳

تابستان زیبا

فصل زیبای تابستان آغاز میانسالی فصول است. هنگامه‌ای که سال در پایان این فصل به میانسالی می‌رسد. زندگی نیز اینگونه است هنگامی که بهار زیبای زندگی خود را سپری می‌کنیم به میانه زندگی خویش نزدیک می‌شویم. اما همواره می‌توان اینگونه تصور کرد که چه زیبا می‌شد اگر تکامل میانسالی را با طراوت و تازگی جوانی توامان داشت. تا مدتها این آرزوی بسیاری از نسل‌های بشر در حوزه علم، فناوری و اختراعات بوده است.

آرزوی جوان ماندن تا سال‌ها یکی از مهم‌ترین تلاش‌های جامعه پزشکی در کشورهای مختلف و در دوره‌های گوناگون بوده و در این راه سرمایه‌های بسیاری صرف به نتیجه رسیدن و دستیابی به این آرزو شده است.

امروز می‌توان به درستی این ادعا را مطرح کرد که علم تا حدود بسیار زیادی به این آرزو دست یافته است.

اگر می‌پرسید چگونه؟ پاسخ خواهم داد: با دستگاه‌های پیشرفته کمپانی وایول کشور کره جنوبی!

کمپانی وایول یکی از به‌روزترین و منحصربه‌فردترین تکنولوژی‌های

جوانسازی پوست را اختراع کرده است.

دستگاه‌های پیشرفته کمپانی وایول در حیطه جوانسازی بسیار موثر هستند و

به درستی می‌توان ادعا کرد که تاثیرهای ماندگار خود را بر پوست نشان داده‌اند.

این اتفاق نشان داده است که می‌توان در میانسالی همچنان به جوانی دست یافت و آنرا حفظ کرد و از آن لذت برد.

کمپانی وایول در این راه پیشتاز است و

شرکت آمیکوویسنایارس نماینده انحصاری

کمپانی وایول در ایران است و در کنار دیگر محصولات منحصربه‌فرد خود در حیطه

پوست و زیبایی محصولات این کمپانی را

هم به جامعه محترم پزشکی ارائه می‌کند. تابستان مبارک!



بهبود چین و چروک های اطراف چشم با دستگاه کم‌تهاجم RF میکرونیدلینگ

صفحه ۲

گفت‌وگو با دکتر شریانی، متخصص پوست، مو و زیبایی

صفحه ۴


گردهمایی علمی پزشکان عمومی و تازه‌های پزشکی

صفحه ۷

کلینیک کرتون

صفحه ۸

بهبود چین و چروک های اطراف چشم با دستگاه کم تهاجم RF میکرونیدلینگ

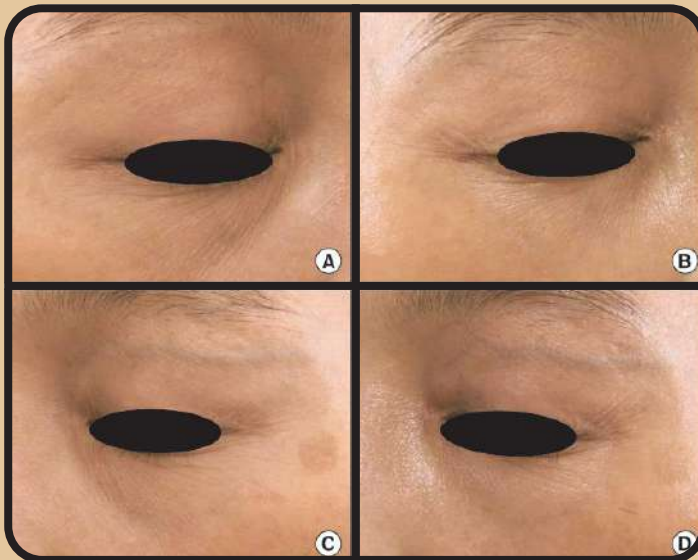



چین و چروک های اطراف چشم به عنوان یکی از علائم پیری پوست شناخته می شود. انقباض عضلات چشم در حرکات و حالات مختلف صورت باعث ایجاد چین و چروک روی پوست می شود و آسیب ناشی از اشعه فرابنفش را تشدید می کند. علاوه بر این تغییرات حجم بافت در طی فرآیند پیری، تغییرات مورفولوژیکی ناحیه دورچشمی را به همراه می آورد.

دور چشم به دلیل ویژگی های منحصر به فرد و عملکرد مهم آن یک ناحیه خاص جهت درمان می باشد. همچنین با توجه به آسیب پذیری آناتومیک این ناحیه، درمان چین و چروک های اطراف چشم باید با احتیاط انجام شود تا از هر گونه عوارض جانبی از جمله آسیبهای عملکردی جلوگیری شود.

تاکنون روش هایی مانند تزریق سم بوتولینوم، تزریق فیلر، درم ابریژن، لایه برداری شیمیایی و لیزرهای مختلف درمانی برای رفع چین و چروک اطراف چشم استفاده شده اند اما نتایج آن ها متغیر هستند و هیچ درمان بهینه واحدی وجود ندارد.

سیستم RF کم تهاجم به وسیله میکرونیدل ها به پوست نفوذ می کند و به طور مستقیم انرژی حرارتی را به درم می رساند و باعث القای بازسازی کلاژن و در نتیجه جوانسازی و سفت شدن پوست می شود. از آن جایی که میکرونیدل ها بسیار نازک هستند و انعقاد حرارتی محدود به نوک الکترود می شود، در مقایسه با دستگاه RF غیرتهاجمی، بازسازی و جوانسازی پوست به طور موثر و بدون آسیب به اپیدرم رخ می دهد.

در یک تحقیق، میزان اثرگذاری RF میکرونیدلینگ در ۳ خانم ۶۶، ۴۹ و ۴۵ ساله با درجات مختلفی از چین و چروک در نواحی اطراف چشم بررسی شد. درمان RF میکرونیدلینگ با انرژی ۳-۴، عمق نفوذ ۱-۱/۵ میلی متر و در یک pass با همپوشانی کمتر از ۱۰٪ بر روی سه بیمار انجام شد. نتایج به دست آمده از مقایسه تصاویر تهیه شده در ابتدا و ۲ هفته پس از آخرین درمان بیانگر بهبود عینی و قابل توجه چین و چروک های اطراف چشم در تمام بیماران همراه با دوره نقاهت کوتاه، بدون ایجاد کبودی یا سایر عوارض جانبی بوده است. لازم به ذکر است که این نتایج درخشان تنها در طی ۲ جلسه ایجاد شده که رضایت تمامی بیماران را به همراه داشته است.

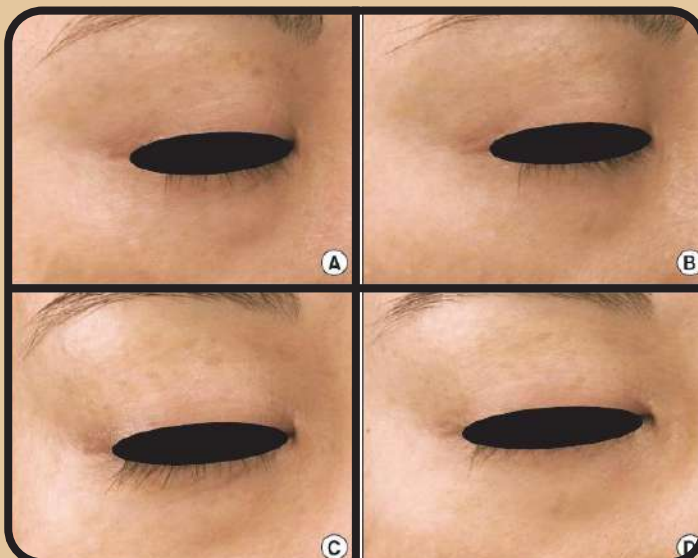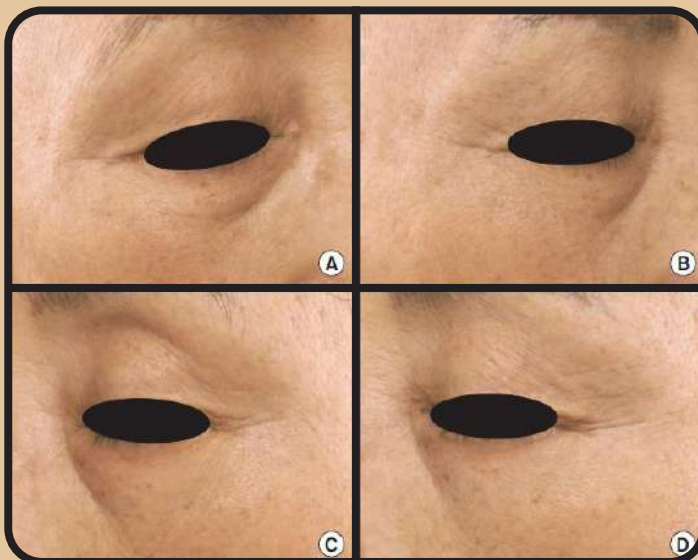

نتایج بهبود چین و چروک های دور چشم در افراد مختلف (A,C) قبل و (B,D) ۲ هفته پس از آخرین درمان با RF میکرونیدلینگ کم تهاجم

SYLFIRM^X

ULTIMATE EDITION

موثرترین
ایمن‌ترین
ویژه‌ترین




Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)
aypmedical.com

گفت‌وگو با دکتر شربانی، متخصص پوست، مو و زیبایی

بدون هیچ محدودیتی برای تایپ‌های مختلف می‌توان بطور موثر و ایمن درمان کرد

بطور کلی من از دستگاه Scarlet S راضی هستم و بیمارانی که نتایج خوبی را از درمان مشاهده کرده‌اند. در برخی از موارد در جلسات بالا و در حالت long از انرژی‌های بالاتر استفاده می‌کنم. در بیمارانی که تحت درمان با این دستگاه هستند تاکنون عارضه خاصی مشاهده نشده است. اریتم بیمار به سرعت و در طی ۱-۲ روز بهتر می‌شود. این دستگاه اثرات مثبتی روی اسکار آکنه، منافذ صورت و جوانسازی دارد و در بهبود غبغب نیز استفاده شده است. حتی در فردی که راکوتان مصرف می‌کرد و از این دستگاه برای درمان اسکار هایپرتروفیک استفاده شد، نتایج رضایت‌بخشی را به همراه داشت. بنابراین روی اسکار هایپرتروفیک هم به خوبی پاسخ داده است.

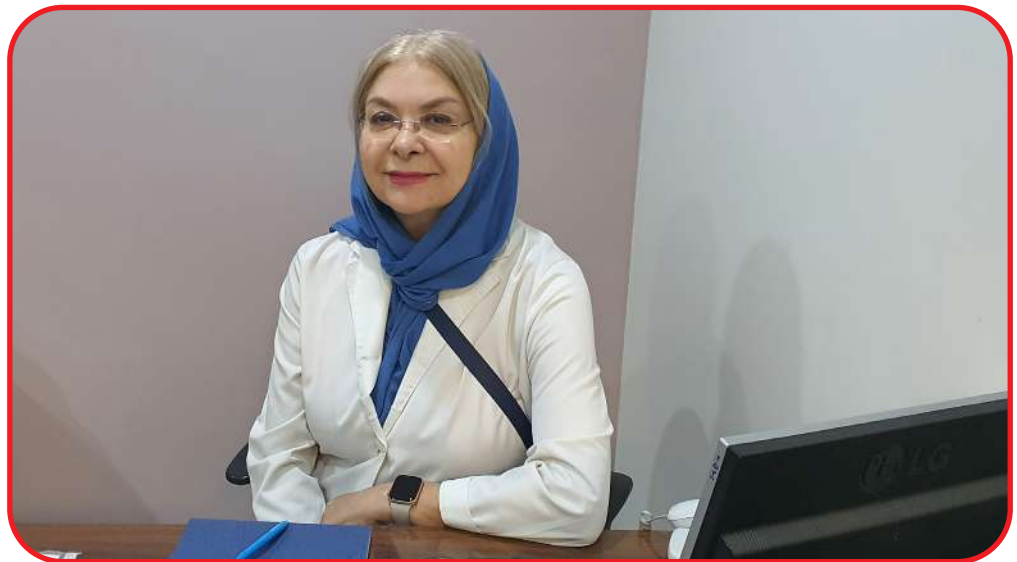

● خانم دکتر لطفا خودتان را معرفی کنید؟

من دکتر ژاله شربانی متخصص پوست، فارغ التحصیل بودم با رتبه اول در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران هستم. و بیش از ۳۰ سال است که به عنوان درماتولوژیست مشغول به فعالیت هستم.

● لطفا بفرمایید از چه زمانی با تکنولوژی RF میکرونیدلینگ آشنا شدید؟

بیشتر از ۱۰ سال هست که من با این تکنولوژی آشنایی دارم.

● مکانیسم اثر در RF میکرونیدلینگ Scarlet S به چه صورتی می‌باشد؟

این دستگاه بر پایه رادیوفرکانسی (RF) کار می‌کند. RF جریان الکتریکی مربوط به فرکانس‌هایی است که سیگنال‌های رادیویی را با خود حمل می‌کنند. هنگامی که RF به بافت پوست منتقل می‌شود، مولکول‌های موجود در پوست اصطکاک ایجاد می‌کنند و دمای بافت بین ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد بالا می‌رود. این فرآیند باعث تغییرات ساختاری، تغییر ماهیت یا انعقاد پروتئین‌ها و کلاژن می‌شود که بهبود زخم و تحریک کلاژن‌سازی را در پی دارد. علاوه بر این میکرونیدلینگ با آسیب‌های مکانیکی روی پوست باعث التیام زخم و تولید کلاژن می‌شود. در Scarlet S که یک RF میکرونیدلینگ است، در حقیقت ما ترکیبی از RF و میکرونیدلینگ را داریم که در یک سیستم واحد انرژی RF با صورت دقیق و عمیق با ایجاد میکرو زخم‌هایی روی پوست دریافت می‌کند. این دستگاه از روش فرکشنال استفاده می‌کند. در واقع از طریق میکرونیدل‌ها زخم‌های کوچک میکروسکوپی ایجاد می‌کنیم که با کمک بافت سالم اطراف ترمیم رخ دهد که باعث بهبود بافت پوست، سفت شدن آن، تحریک کلاژن‌سازی، درمان جای آکنه و حتی آکنه فعال می‌شود. این دستگاه در عین محافظت از لایه اپیدرم، اثر خود را در درم می‌گذارد.

● عمق نفوذ نیدل‌های Scarlet S چقدر می‌باشد؟

عمق نفوذ نیدل‌ها در Scarlet S در محدوده ۰/۵-۳/۵ میلی‌متر می‌باشد که با توجه به این گستره

بیشتری دارد و تاثیر RF روی آن کمتر خواهد بود.

● برای نتیجه گیری بهتر چه نکاتی را باید در حین درمان مد نظر داشته باشیم؟

اگر بیمار آکنه فعال دارد حتما باید داروهایش را مصرف و در کنار آن از RF استفاده کند. در برخی از موارد که آکنه فرد را درمان می‌کنیم اما هنوز اریتم دارد، برای بهبود اریتم از RF استفاده می‌کنیم چرا که این اریتم یک نشانه‌ای است از اینکه ممکن است اسکار ایجاد شود. بنابراین بهتر است قبل از ایجاد اسکار درمان با RF را شروع کنیم.

● برای جلوگیری از بروز عوارض جانبی احتمالی چه نکاتی را باید مدنظر داشته باشیم؟

من در درمان‌های انجام شده با Scarlet S عارضه جانبی خاصی را ندیدم. در بحث انرژی نیز من در جلسات اول با پارامترهای پیشنهادی شروع می‌کنم و در جلسات بعد با توجه به پاسخ پوست میزان انرژی را بالا می‌برم.

از آنجایی که Scarlet S یک دستگاه کم تهاجم است که از میکروسوزن‌ها برای نفوذ به پوست و اعمال انرژی RF به صورت کنترل شده استفاده می‌کند، می‌تواند انرژی RF را با دقت بیشتری به ناحیه مورد نظر برساند. علاوه بر این با توجه به این که انرژی RF بصورت فرکشنال منتقل می‌شود نه بصورت گرمای bulk، آسیب گرمای باقی‌مانده در مقایسه با روش‌های غیرتهاجمی کاهش می‌یابد که امکان ترمیم سریع‌تر پوست بدون عوارض جانبی را فراهم می‌کند.

● دوران نقاهت درمان با Scarlet S چقدر است؟ در اکثریت بیماران دوران نقاهت کمتر از یک هفته، گاهی حتی ۲-۳ روز بوده است. تا یک هفته اول به بیمار کرم ترمیم‌کننده داده می‌شود و توصیه می‌شود که داروهای لایه بردارشان را قطع کنند.

● اصولا تعداد جلسات درمانی و فواصل بین آنها چقدر است؟

حداقل ۴ جلسه مورد نیاز است. چون سیستم فرکشنال است ما اینطور در نظر می‌گیریم که هر جلسه ۲۵ درصد پوست را درمان می‌کنیم. بنابراین ۴ جلسه باید انجام شود و بسته به نیاز بیمار ممکن است تعداد جلسات بیشتری هم لازم باشد. فواصل بین جلسات حدود ۱ ماه است.

● مقایسه Scarlet S با دستگاه‌های میکرونی‌دینگ دیگر:

من بیشتر از Scarlet S استفاده می‌کنم. قبلا از دستگاه‌های RF دیگری هم استفاده می‌کردم که نتایج خوبی داشت اما میکرونی‌دینگ‌های آن نارسا بود و باید عمق را در یک منطقه تغییر می‌دادیم و معمولا بیماران بعد از درمان با آن دستگاه دچار اکیموز می‌شدند که آنها را اذیت می‌کرد در صورتی که Scarlet S به این شکل نیست. در Scarlet S میکرونی‌دینگ‌ها رسانا هستند. هنگامی که RF از طریق میکرونی‌دینگ‌های رسانا به پوست منتقل می‌شود، انعقاد در نوک هر سوزن رخ می‌دهد و به شکل قطره آب گسترش می‌یابد و اثر درمانی در ناحیه مورد نظر را بدون آسیب به اپیدرم (اثر Na) به حداکثر می‌رساند.

عمق نفوذ می‌توان درمان را هم برای صورت و هم بدن داشته باشیم. تعیین عمق نفوذ بستگی به ناحیه تحت درمان و ضخامت پوست دارد. مثلا در صورت تا عمق ۲/۵، در گردن تا عمق ۳ و در پیشانی تا عمق ۲-۱/۵ پیش می‌رویم.

● آیا شما تجربه درمان اسکار هایپرتروفیک با دستگاه Scarlet S را داشته‌اید؟

بله. برای اسکار هایپرتروفیک که فرد فولیکولیک داشته استفاده شده است.

● تابحال تجربه درمان هایپریگمنتیشن و آکنه با Scarlet S را داشته‌اید؟

بله. فردی که اریتم آکنه و هایپریگمنتیشن داشته است، در جلسات بعدی روشن شدن پوستش را به عنوان نتایج پس از درمان ذکر کرده است. در بیمارانی که جای آکنه دارند، پس از درمان با RF مقداری از اریتم آکنه کاسته می‌شود.

● با توجه به اینکه شما پزشک صاحب سبکی هستید چه درمان دیگری را با Scarlet S توصیه می‌کنید؟

به نظر بنده Scarlet S در جوانسازی و درمان اسکار آکنه بهترین نتایج را می‌تواند داشته باشد.

● کامبینیشن RF با دستگاه‌ها و مزوژل‌ها چگونه است؟

در برخی موارد بهتر است که از درمان‌های ترکیبی استفاده شود. در مقالات اخیر پیشنهاد می‌شود که همراه با RF از لیزر CO₂ یا اربیوم-گلس استفاده شود. همچنین بیمار می‌تواند از روش هایفو نیز در کنار RF بهره برد. با دستگاه Icon نیز می‌توان درمان ترکیبی انجام داد. من برای برخی از بیماران در نواحی که گودی و فرورفتگی دارند، بعد از چند جلسه RF از فیلرها هم استفاده می‌کنم که باعث نتایج بهتری می‌شود.

● معیار انتخاب مراجعه برای RF میکرونی‌دینگ بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟


بیشتر بیمارانی را انتخاب می‌کنیم که وقتی پوست را می‌کشیم، اسکار باز شود و اسکار خیلی چسبندگی نداشته باشد در این صورت باید از قبل سابسیژن انجام شود. برای اسکارهای خفیف تا متوسط و یا برای اسکارهای شدید که چسبندگی زیادی ندارند نیز استفاده می‌شود.

● آیا محدودیت تایپ پوستی برای درمان با RF میکرونی‌دینگ داریم؟

خیر. برخلاف لیزر، RF تحت تاثیر ضرایب جذب کروموفورها مانند ملانین قرار نمی‌گیرد. تقریبا هیچ محدودیتی برای انواع و تایپ‌های مختلف پوستی وجود ندارد. بطوری‌که همه تایپ‌های پوستی از جمله پوست‌های تیره را می‌توان بطور موثر و ایمن درمان کرد. بطور کلی نه تنها در تایپ پوستی بلکه در گروه‌های سنی و جنسیت هم محدودیتی وجود ندارد چرا که این دستگاه طیف گسترده‌ای از پارامترها را به ما می‌دهد که با انتخاب پارامتر مناسب می‌توان برای سنین و جنسیت‌های مختلف درمان را انجام داد.

● نتایج میکرونی‌دینگ چه زمانی مشخص می‌شود؟

معمولا از همان جلسه اول بیمار تغییرات را حس می‌کند اما هر جلسه نتایج بهتر می‌شود و معمولا در جلسات دوم یا سوم به بعد نتایج مشهودتر می‌شود. نتایج در افراد مختلف متفاوت است. برخی بیماران به بهبود ۸۰-۷۰ درصدی دست پیدا می‌کنند اما در برخی از بیماران هم درصدهای پایین‌تری را مشاهده می‌کنیم. هر چه اسکار قدیمی‌تر باشد، فیبروز

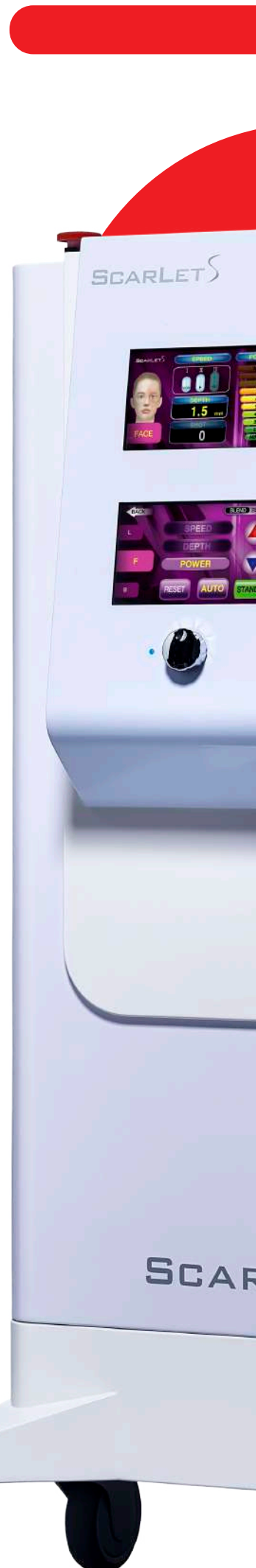

SCARLETS

تجربه دوباره جوانی!

تاثیرگذارتر

ماندگارتر

بدون عارضه



Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)
aypmedical.com



**گردهمایی علمی پزشکان عمومی و تازه‌های پزشکی
در بیماری‌های شایع در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد**

درخشش محصولات منحصر به فرد آمیکویسنایپارس



گردهمایی علمی پزشکان عمومی و تازه‌های پزشکی در بیماری‌های شایع در مرکز همایش‌های رازی از ۲۳ تا ۲۵ خرداد ماه با حضور پزشکان عمومی در تهران برگزار شد. بی تردید برگزاری چنین گردهمایی‌هایی نقشی بسیار ارزشمند در معرفی ابعاد جدید علم پزشکی خواهد داشت. با عنایت به تجربه موفق و استقبال فراوان از کنگره‌های پیشین، این کنگره نیز با حضور پزشکان و شرکت‌های معتبر تجهیزات پزشکی و دارویی با معرفی محصولات برگزار شد.

شرکت آمیکویسنایپارس به عنوان نماینده رسمی و انحصاری کمپانی‌های بزرگ حوزه پوست، مو و زیبایی با چهار برند ساینشور امریکا، وایول و لیزراپتک کره جنوبی و زیمر آلمان به معرفی دستگاه‌های منحصر به فرد خود در زمینه‌های لیزر موهای زائد، جوانسازی، لاغری، درمانی و... پرداخت.

شرکت آمیکویسنایپارس همواره یکی از فعال‌ترین شرکت‌ها در زمینه حضور در کنگره‌هاست زیرا بر این باور است که با حضور در محافل و گردهمایی‌های علمی نقشی فعال ایفا کند و در دیدار با پزشکان محترم حوزه پوست، نسبت به معرفی محصولات منحصر به فرد و ارزشمند خود اقدام کند.

امید است با برگزاری مداوم چنین گردهمایی‌هایی و حضور پیوسته شرکت آمیکویسنایپارس، ارتباط مستمر میان عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی منحصر به فرد و جامعه محترم پزشکی پایدار باشد.





تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل صدر، پلاک ۱۶۹۸، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۳۰۰
info@aypmedical.com

آمی‌کویسن‌پارس

خبرنامه پوست و زیبایی / شماره بیست و سوم، تیر ۱۴۰۳

