

آمیکوئیسناپارس

شماره ۲۵

خبرنامه پوست و زیبایی / شهریور ۱۴۰۳

پاییز در می‌زند!

پایان تابستان را به نظاره نشسته‌ایم. تابستانی که گرم، طاقت‌فرسا و البته خاطره‌انگیز بود.

در همین روزها در می‌زنند و هنگامی که در را باز می‌کنم، نخستین برگ زرد پشت در خانه است.

او نخستین برگ زرد امسال است که در شهریور به سراغ شهر آمده است. دوستانی دارد هم‌رنگ خود و البته نارنجی و آبی که در ماه‌های پیش رو به سراغ ما خواهند آمد.

او در بهار زیبا و گرمای تابستان امسال بر روی کهنسال‌ترین درخت خیابان شهر زاده شد و اکنون تن خسته و رنجور خویش را به زمین خواهد سپرد تا خبری را برساند.

خبر گذر ایام، خبر روزهای پیش رو و فصل آینده...

اما گذر ایام بر ما شهروندان این شهر همچنان جاریست. جوانی را سپری می‌کنیم و پای در میانسالی و درپی آن کهنسالی می‌گذاریم.

اما چه می‌شود کرد... کاش راهی برای ماندن بود... ماندن در جوانی و حتی میانسالی.

ماندن در سن پر طراوت و شادابی جوانی.

اکنون دیگر گذر ایام کندتر شده است و می‌توان در لحظه‌هایی ماند و بیشتر درنگ کرد.

شرکت آمیکوئیسناپارس، با محصولات منحصر به فرد خود می‌تواند زمان جوانی را دوباره برای شما متولد کند.

ما به عنوان نماینده رسمی کمپانی وایول کره جنوبی در ایران و با دارا بودن سال‌ها تجربه در انتخاب، معرفی و پشتیبانی دستگاه‌های منحصر به فرد در حوزه پوست، مو و زیبایی دستگاه‌های جوانساز با پشتیبانی تکنولوژی روز را به جامعه محترم پزشکی ارائه کرده‌ایم. اینبار دیگر پاییز زود به سراغتان نخواهد آمد.

اینبار پاییز به کندی و دیرتر به سراغ شما خواهد آمد و ماندگار نخواهد بود.

به مناسبت اول شهریور، روز پزشک، آنان که خاک را در نظر کیمیا کنند

صفحه ۲

بررسی کلینیکی درمان چروک؛ نتایج درخشان برای بازگشت جوانی

صفحه ۴

دهمین کنگره سراسری تازه‌های درماتولوژی، لیزر و جراحی پوست اصفهان

صفحه ۷

کلینیک کارتون

صفحه ۸

به مناسبت اول شهریور، روز پزشک
و به یاد طبیبی که روح و جان را
پیوسته می‌دانست!

آنان که خاک را در نظر کیمیا کنند



حکیم و طبیب در افق نگاه و قضاوت ما شخصیتی مبرز و برخوردار از دانش پزشکی و آراسته به فضائل والای اخلاقی است و نماد برجسته و الگوی بارز چنین اندیشوران دلسوز و عالمان فرزانه در تاریخ پر فروغ این سرزمین، طبیب نامور و نابغه بزرگ ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا بود که بدلیل کوشش‌هایش در ارتقای دانش پزشکی و رسیدن به شناخت معنای طبابت به الگویی شایسته برای انسان معاصر تبدیل شد.


در ایران، اول شهریور ماه، همزمان با زادروز ابوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته، و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده است. ابوعلی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام (Avicenna) و با لقب "امیر پزشکان" شناخته شده است، در ۳۷۰ قمری (۱ شهریور ۳۵۹) در شهر بخارا به دنیا آمد.

ابوعلی سینا، نه تنها یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان جهان، بلکه یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ پزشکی در همه دوران‌هاست. مهم‌ترین اثر وی در پزشکی، کتاب قانون (القانون فی الطب) است که آن را پیش از سال ۴۰۶ هجری قمری، یعنی در حدود ۳۵ سالگی تألیف کرده است. این کتاب طی چندین سده، چه در سرزمین‌های اسلامی و چه در اروپای سده‌های میانه، همه کتاب‌های دیگر را در سایه خود نهاده بود.

SYLFIRM^X

ULTIMATE EDITION

موثرترین
ایمن‌ترین
ویژه‌ترین

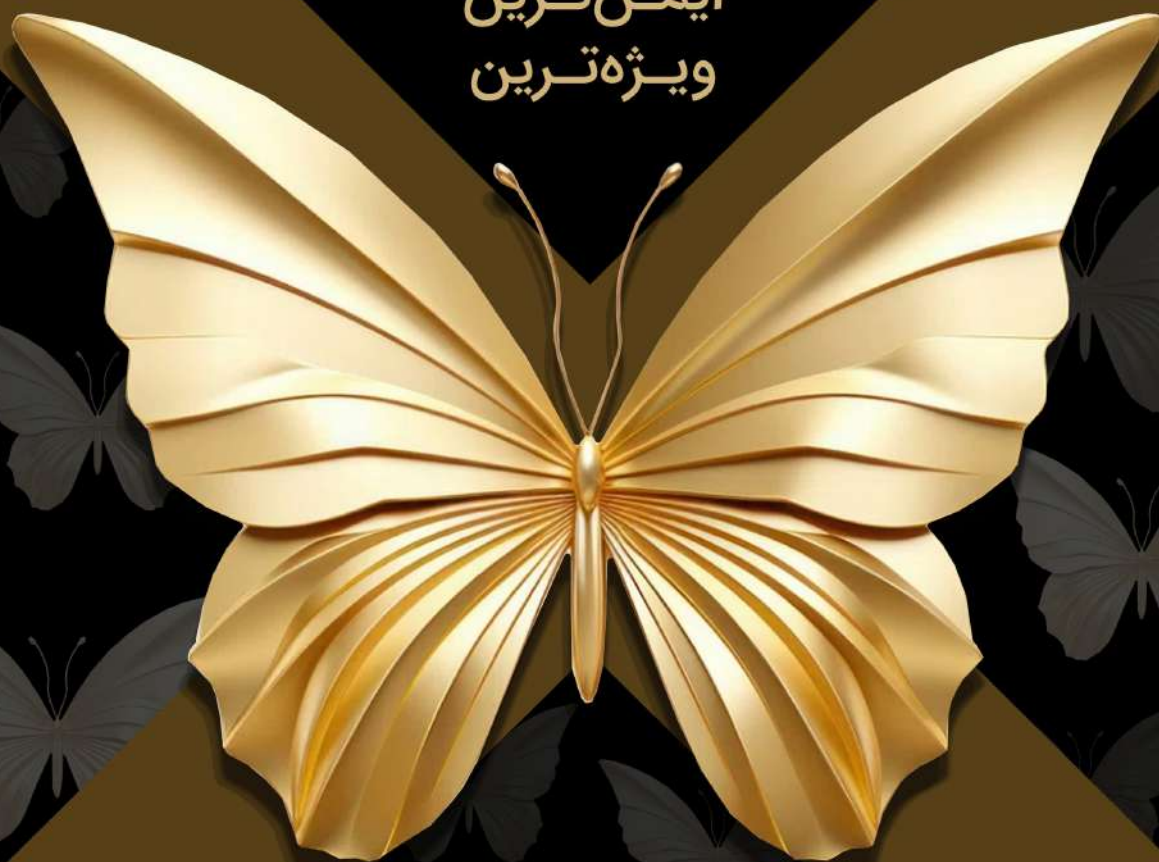

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)
aypmedical.com

نتایج درخشان برای بازگشت جوانی

تشکیل چین و چروک روی پوست، بخشی از روند طبیعی افزایش سن در بدن است. درواقع، تغییرات سلولی ایجاد شده در اثر گذر عمر باعث ایجاد این خطوط روی پوست صورت می‌شود. در طول حیات، از کودکی تا میان‌سالی، سلول‌های پوستی با سرعت و به صورت دائم تکثیر می‌شوند. تکثیر لایه درم، از بین رفتن لایه اپیدرم را جبران می‌کند و هرگونه آسیب جزئی را بی‌اثر می‌سازد. به همین دلیل معمولاً اثر زخم در کودکی و جوانی با سرعت بیشتری بهبود می‌یابد یا کاملاً از بین می‌رود. با افزایش سن، سرعت تکثیر سلول‌های درم کاهش یافته، در نتیجه احیای اپیدرم نیز کند می‌شود که در نهایت نازک شدن لایه‌های بیرونی پوست و آسیب‌پذیری بیشتر آن را به دنبال دارد. نکته دیگر کاهش میزان تولید پروتئین‌های پوستی (کلاژن و الاستین) است که سرعت ترمیم پوست را کاهش می‌دهد. یکی از روش‌های درمانی برای بهبود چروک‌های صورت و معکوس کردن روند پیری استفاده از سیستم‌های فرکشنال RF میکرونییدلینگ است. درمان‌های ترمولیتیک با دستگاه‌های RF برای درمان چین و چروک، آکنه و اسکار آکنه در بسیاری از کلینیک‌های زیبایی پوست انجام شده است. دستگاه‌های RF بازسازی بافت توسط نئوکلاژنز را القا می‌کنند. جریان‌های الکترونیکی دستگاه‌های RF بسته به امپدانس بافت، باعث ایجاد گرمای زیاد در بافت هدف می‌شوند، که به عنوان واکنش الکتروحرارتی شناخته می‌شود. وقتی RF به




درمانی در شرایط یکسان عکس گرفته شد. دو پزشک با مقایسه عکس‌های قبل و بعد ارزیابی‌های بالینی را با استفاده از مقیاس بهبود جهانی (درجه ۰= بدتر، درجه ۱-۲۵٪ = حداقل بهبود یا حالت پایدار؛ درجه ۲، ۲۶-۵۰٪ = بهبود متوسط، درجه ۳، ۵۱-۷۵٪ = بهبود قابل تشخیص و درجه ۴، > ۷۵٪ = نزدیک به بهبود کامل) انجام دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که ۲۶/۵٪ از ۲۰۴ بیمار دارای بهبود بالینی درجه ۴، ۴۲/۲٪ بهبود درجه ۳، ۲۴/۵٪ بهبود درجه ۲ و ۶/۹٪ بهبود درجه ۱ داشتند. همچنین لازم به ذکر است عوارض جانبی احتمالی، از جمله PIH مداوم، اسکار، هیپوپیگمانتاسیون، عفونت باکتریایی ثانویه، تشکیل تاول پس از درمان و عفونت ویروسی، مشاهده نشد.

پوست می‌رسد، جریان‌های الکتریکی بوسیله آب، عروق و فیبرهای کلاژن جذب می‌شود. در نتیجه، واکنش‌های الکتروحرارتی بافت‌های پوستی را منعقد و تجمع سلولی، ترشح سیتوکین‌ها و فاکتورهای رشد برای بازسازی بافت را القا می‌کند.

در یک مطالعه ۲۰۴ بیمار با میانگین سنی ۴۷.۳ سال جهت بهبود چین و چروک‌های پوستی خود تحت ۳ جلسه درمان با سیستم فرکشنال RF میکرونیدلینگ با فواصل ۴ هفته قرار گرفتند. درمان RF روی کل صورت در طی یک تا دو pass انجام شد و یک تا دو pass اضافی برای چین و چروک‌های متوسط یا شدید در نظر گرفته شد. عمق نفوذ در بازه ۰/۸-۳ میلی‌متر و سطح انرژی ۶-۸ در نظر گرفته شد. از بیماران در ابتدا درمان و ۳ ماه پس از آخرین جلسه

بهبود قابل توجه در چین و چروک اطراف چشم در یک خانم ۴۸ ساله پس از دو جلسه درمان با RF. عکس‌ها قبل (A) و دو ماه پس از آخرین درمان (B) گرفته شده‌اند.

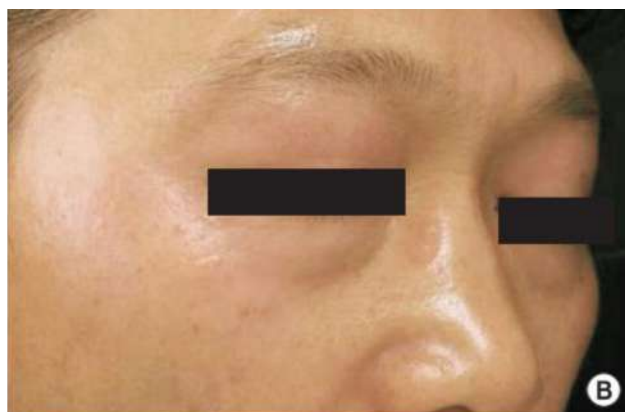

بهبود قابل توجه چین و چروک در پیشانی بیمار مرد ۵۶ ساله پس از ۳ جلسه درمان با RF. عکس‌ها قبل (A) و سه ماه پس از درمان (B) گرفته شده‌است.



SCARLETS

تجربه دوباره جوانی!


تاثیرگذارتر

ماندگارتر

بدون عارضه



Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)
aypmedical.com

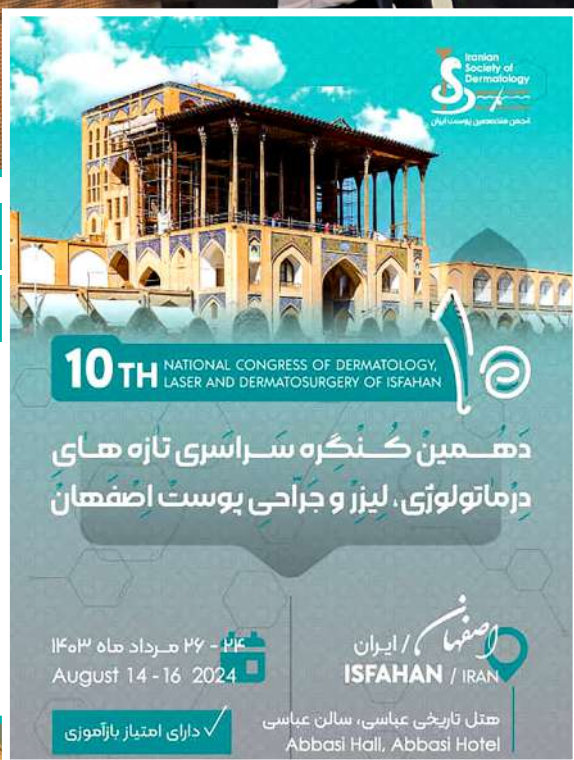

دهمین کنگره سراسری تازه های درماتولوژی،
لیزر و جراحی پوست اصفهان

درخشش آمیکویسنایپارس در نصف جهان

دهمین کنگره سراسری تازه های درماتولوژی، لیزر و جراحی پوست اصفهان در هتل تاریخی عباسی، سالن عباسی از ۲۴ تا ۲۶ مرداد ماه با حضور متخصصین در اصفهان برگزار شد. بی تردید برگزاری چنین کنگره هایی نقش بسیار ارزشمند در معرفی ابعاد جدید علم پزشکی خواهد داشت. با عنایت به تجربه موفق و استقبال فراوان از کنگره های پیشین، این کنگره نیز با حضور پزشکان و شرکت های معتبر تجهیزات پزشکی با معرفی محصولات برگزار شد.

شرکت آمیکویسنایپارس به عنوان نماینده رسمی و انحصاری کمپانی های بزرگ حوزه پوست، مو و زیبایی با چهار برند ساینشور امریکا، وایول و لیزراپتک کره جنوبی و زیمر آلمان به معرفی دستگاه های منحصر به فرد خود در زمینه های لیزر موهای زائد، جوانسازی، لاغری، درمانی و... پرداخت. شرکت آمیکویسنایپارس همواره یکی از فعال ترین شرکت ها در زمینه حضور در کنگره ها است زیرا بر این باور است که با حضور در محافل و گردهمایی های علمی نقش فعال ایفا کند و در دیدار با پزشکان محترم حوزه پوست، نسبت به معرفی محصولات منحصر به فرد و ارزشمند خود اقدام کند. امید است با برگزاری مداوم چنین گردهمایی هایی و حضور پیوسته شرکت آمیکویسنایپارس، ارتباط مستمر میان عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی منحصر به فرد و جامعه محترم پزشکی پایدار باشد.



کلینیک کارتون!
کیوان وارثی



تولدی دوباره
با دستگاه RF جوانساز سیلفرم
کمپانی وایول

تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، پلاک ۱۶۹۸، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۳۰۰
info@aypmedical.com

آمیگوپسنارس

خبرنامه پوست و زیبایی / شماره بیست و پنجم، شهریور ۱۴۰۳

apararat.com/amicoyasnapars



vipdermacustomersportal.ir



aypmedical.com

