

آمیکوپسنایارس

شماره ۲۶

مهر ۱۴۰۳ / خبرنامه پوست و زیبایی

آبرنگ پاییزی

پاییز از راه رسیده است و برگ‌ها یکی پس از دیگری خود را در آبرنگ طبیعت غوطه‌ور می‌کنند و رنگ‌های زیبای پاییزی را به رخ می‌کشند.

نارنجی، قرمز، ارغوانی و بنفش همه روی درختان خودنمایی می‌کنند و آبرنگ پاییزی جهان ما را جذاب و زیبا می‌کند. با همین رنگ‌های زیبا و بی‌نظیر فصل پاییز برای ما خاطره‌انگیز می‌شود و هر لحظه‌اش به یاد ماندنی است.

پاییز گرچه فصل خواب و سکوت طبیعت است اما درختان با رها کردن برگ‌هایشان سبک‌تر به خوابی طولانی می‌روند و خواب می‌بینند، خواب بهاری که در راه است و جوانه‌های سبزی که دوباره خواهد رویید.

آری... درختان به خواب می‌روند و آسوده در اندیشه دوباره زیستن و زندگی و جوانی دوباره روزی بیدار خواهند شد و فرش سبز طبیعت پهن خواهد شد. ما در شرکت آمیکوپسنایارس همواره در اندیشه جوانی دوباره هستیم و در این راه با ارائه دستگاه‌های منحصربه‌فرد پوست از کمپانی‌های معتبر جهانی و معرفی آنها به جامعه محترم پزشکی اقدام کرده‌ایم.

برای ما رسیدن به میانسالی و کهنسالی و دست یافتن دوباره به اکسیر جوانی نکته‌ای مهم است که از طبیعت الهام گرفته‌ایم و همواره درکوشش برای کشف راهکاری نوین و آزموده و ارائه آن به جامعه محترم پزشکی هستیم.

در این مسیر دستگاه‌های سیلقرم و اسکارلت از کمپانی وایول کره جنوبی از مهم‌ترین دستگاه‌های شرکت آمیکوپسنایارس در رسیدن به این هدف مهم و ارزنده هستند.

افتخار ما همواره ارائه دستگاه‌ها و دستاوردهای نوین در حوزه دانش پزشکی و حوزه پوست، جوانسازی و زیبایی است.

پاییزتان رنگارنگ!

مسیر رشد و درخشش یک برند

صفحه ۲ و ۳

نتایج رضایت‌بخش دستگاه در زمینه جوانسازی پوست

صفحه ۴

ایمن و موثر بدون ایجاد عوارض جانبی

صفحه ۶ و ۷

کلینیک کارتون

صفحه ۸



آشنایی با کمپانی Viol و دو محصول منحصر به فرد

مسیر رشد و درخشش یک برند



کمپانی Viol

کمپانی Viol از سال ۲۰۰۹ تاسیس شد و به عنوان یک متخصص در مطالعه و تولید دستگاه‌های پزشکی که در آن بیوتکنولوژی و الکترونیک همگرا هستند، پیشتاز است. Viol به مطالعه و سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ‌تر ادامه داده است تا به یک رهبر جهانی جدید Bio-Electro Ceuticals تبدیل شود و عصر جدیدی را آغاز می‌کند. در نتیجه، Scarlet S™، Sylfirm X™، اولین نتایج تعهد Viol، اکنون به طور گسترده در سراسر جهان به دلیل قدرت تکنولوژیکی که Viol در آنها گنجانده است، شناخته شده است. Viol قدم به قدم جلو خواهد رفت تا ارزش اصلی خود، VICTORY OF LIFE را ارائه دهد.

اثر Na:

در سال ۲۰۱۵، بنیانگذار Viol، دکتر جونگ جونا، یک مطالعه بالینی برای مشاهده پاسخ پوست به انرژی RF دوقطبی از طریق میکروسوزن‌های غیرعایق انجام داد. هنگامی که انرژی RF دوقطبی از طریق یک میکروسوزن غیرعایق آزاد می‌شود، انعقاد در انتهای هر میکروسوزن شروع و به شکل قطره اشک ایجاد می‌شود و اثر درمانی را برای بافت هدف به حداکثر و آسیب حرارتی به اپیدرم را به حداقل می‌رساند. این اثر «Na» نامیده می‌شود.

SCARLET S

:Scarlet S

Scarlet S یک دستگاه RF فرکشنال میکرونیدلینگ و دارای تاییدیه FDA است. RF فرکشنال یک روش کم‌تهاجمی محسوب می‌شود که مزایای درمان‌های میکرونیدلینگ و فرکانس رادیویی را در یک روش ترکیب می‌کند. میکرونیدل‌ها برش‌های کوچک کنترل شده‌ای را در پوست ایجاد می‌کنند و عوامل رشد طبیعی، روند ترمیم زخم و تولید کلاژن را تحریک و به تخریب بافت اسکار کمک می‌کنند. Scarlet S دارای امواج پیوسته (CW) می‌باشد و در درمان منافذ باز پوستی، اسکار، ترک‌های پوستی، آکنه و اسکار آکنه، جوانسازی و لیفتینگ پوست استفاده می‌شود.



SYLFIRM X

:Sylfirm

Sylfirm یک دستگاه RF میکرونیدلینگ با امواج

پالسی PW است و به طور انتخابی عروق غیرطبیعی

پوستی را درمان و غشای پایه پوست را تقویت می‌کند. از جمله

کاربردهای Sylfirm می‌توان به درمان ملاسما، قرمزی پوست، روزاسه،

PIH، خطوط و چروک‌های ظریف پوستی، منافذ باز پوست، جای

جوش و آکنه اشاره کرد.

:Sylfirm X

Sylfirm X اولین و تنها دستگاه RF میکرونیدلینگ با طول موج دوگانه

در جهان است و علاوه بر امواج پیوسته (CW) مجهز به امواج پالسی

(PW) نیز می‌باشد. در این دستگاه انرژی RF از طریق میکرونیدل‌ها

به پوست منتقل می‌شود و باعث تولید گرما تا دمای ۶۰ درجه می‌شود.

در این دما انعقاد و دنا توره شدن پروتئین‌ها یا تغییرات ساختاری در

پروتئین‌ها، تحریک پوست و در نتیجه کلاژن‌سازی و بهبود ساختار

پوست اتفاق می‌افتد. بنابراین در مقایسه با Sylfirm علاوه بر درمان

ضایعات پیگمانته و ضایعات عروقی، در درمان منافذ باز، چین و

چروک‌های ریز پوستی، شلی و افتادگی پوست، اسکار آکنه، ترک‌های

پوستی و ... کاربرد دارد.



گفت‌وگو با دکتر رامین انعام زاده،
متخصص پوست، مو و زیبایی

نتایج رضایت‌بخش دستگاه در زمینه جوانسازی پوست



• آقای دکتر لطفا خودتان را معرفی نمایید.

من دکتر رامین انعام زاده، متخصص پوست، مو و زیبایی هستم. همچنین بنده موسس و مسئول فنی کلینیک پوست، مو و زیبایی آریا و پاسارگاد هستم.

• لطفا بفرمایید از چه زمانی با تکنولوژی RF میکرونی‌دینگ آشنا شدید؟

بنده از سال ۱۳۹۴ با دستگاه RF میکرونی‌دینگ Scarlet S آشنا شدم و در هر دو کلینیک خود از این دستگاه برای بیش از سه هزار مراجعه کننده استفاده کرده‌ام و نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است. RF میکرونی‌دینگ یکی از متدهای رایج در جوانسازی است. دستگاه اسکارلت ساخت کمپانی Viol کره جنوبی یکی از دستگاه‌های مطرح در زمینه تکنولوژی RF میکرونی‌دینگ می‌باشد.

• مکانیزم اثر در دستگاه RF میکرونی‌دینگ Scarlet S به چه صورت می‌باشد؟

بطور کلی یکی از روش‌های نیمه تهاجمی جوانسازی استفاده از تکنولوژی RF میکرونی‌دینگ می‌باشد. انرژی رادیوفرکانسی از طریق میکرونی‌دیل‌ها به پوست منتقل شده و باعث تحریک فیبروبلاست‌ها و کلاژن‌سازی و در نهایت جوانسازی پوست می‌شود.

• عمق نفوذ نی‌دیل‌های دستگاه Scarlet S به چه میزان می‌باشد؟ عمق نفوذ میکرونی‌دیل‌ها در بازه ۰/۵ تا ۳/۵ میلی‌متر می‌باشد که باتوجه به ناحیه تحت درمان میزان عمق نفوذ را مشخص می‌کنیم.

• کاربردهای اصلی RF میکرونی‌دینگ Scarlet S چیست؟ این دستگاه در زمینه‌های مختلف کاربرد دارد. علاوه بر lifting و tightening و فرم‌دهی صورت، از این دستگاه برای کاهش چربی‌های غبغب و بوکال فت، درمان برخی از آکنه‌های فعال، درمان منافذ باز پوست و درمان ضایعات پیگمانته نیز استفاده می‌شود. عمده کاربرد دستگاه در زمینه جوانسازی پوست است و نتایج رضایت‌بخشی را به همراه داشته است. استفاده از اسکارلت به عنوان گام اول جوانسازی پیشنهاد می‌شود.

• آیا شما تجربه scalp tightening با دستگاه Scarlet S را داشته اید؟

یکی از روش‌های تحریک فولیکول‌های مو نی‌دینگ است. همراه با نی‌دینگ می‌توان از امواج رادیوفرکانسی و مزوژل‌ها بهره برد. همچنین پس از درمان با RF میکرونی‌دینگ می‌توان از hair filler ها نیز استفاده کرد. در حقیقت در این حالت از تحریک مکانیکی، گرمایی و شیمیایی برای رویش مجدد مو استفاده می‌شود. البته

باید عمق نفوذ میکرونی‌دیل‌ها ۲-۱/۵ میلی‌متر باشد

• عوارض جانبی استفاده از دستگاه Scarlet S چیست؟ این دستگاه بطور کلی بی‌خطر است و معمولاً عارضه‌ای ندارد چرا که انرژی آن قابل تنظیم است و همچنین همه افراد با تایپ‌های پوستی مختلف امکان استفاده از این دستگاه را دارند.

• دوران نقاهت درمان با Scarlet S چه مقدار طول می‌کشد؟ پس از درمان تنها مقداری ادم و اریتم مشاهده می‌شود که بعد از ۳ الی ۴ ساعت و حداکثر ۱۲ ساعت برطرف می‌شود و مراجعه کننده با استفاده از کرم‌های ترمیم کننده و ضد آفتاب می‌تواند به فعالیت‌های روزمره خود بپردازد.

• اصولاً تعداد جلسات درمانی و فواصل بین آنها چقدر است؟ در استفاده از دستگاه Scarlet S برنامه درمان بسیار مهم است. تعداد جلسات حتماً باید بین ۴ تا ۶ جلسه و فواصل بین جلسات ۲ الی ۳ هفته باشد تا نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

• ترکیب RF میکرونی‌دینگ با دستگاه‌ها و درمان‌های دیگر چگونه است؟

در این زمینه می‌توان از درمان‌های ترکیبی بهره برد. به عنوان مثال می‌توان بصورت همزمان با RF میکرونی‌دینگ یا پس از آن از مزوژل‌ها استفاده کرد که باعث بهبود نتایج می‌شود.

• آیا استفاده از RF میکرونی‌دینگ تداخلی با تزریق ژل ایجاد می‌کند؟

پس از اتمام دوره درمان با RF میکرونی‌دینگ می‌توان تزریق ژل را داشته باشیم. اما در حین دوره درمان نمی‌توان ژل، فیلر و بوتاکس تزریق کرد چرا که گرمای ایجاد شده بوسیله RF باعث تخریب ژل و فیلرها می‌شود. به عنوان مثال در مواقعی که تزریق بوتاکس باعث افتادگی پلک می‌شود با استفاده از RF میکرونی‌دینگ اثر بوتاکس در این ناحیه را کاهش می‌دهیم.

• آیا دستگاه Scarlet S یک دستگاه User-friendly محسوب می‌شود؟

بله. این دستگاه کاملاً User-friendly هست چرا که انرژی، عمق نفوذ نی‌دیل و سرعت درمان قابل تنظیم است. همچنین مراجعه کننده با استفاده از کرم بی‌حسی دردی را حس نخواهد کرد.


• از نظر شما مزایای Scarlet S نسبت به سایر دستگاه‌های RF میکرونی‌دینگ چیست؟

من از دستگاه‌های RF میکرونی‌دینگ دیگر هم استفاده کرده‌ام اما بیشتر تجربه کار با Scarlet S را دارم. در این دستگاه انرژی و عمق نفوذ قابل تنظیم است و به دلیل استفاده از موتور خطی در این دستگاه، میکرونی‌دیل‌ها بدون ایجاد ضربه وارد پوست می‌شود.

SYLFIRM^X

ULTIMATE EDITION

موثرترین
ایمن‌ترین
ویژه‌ترین

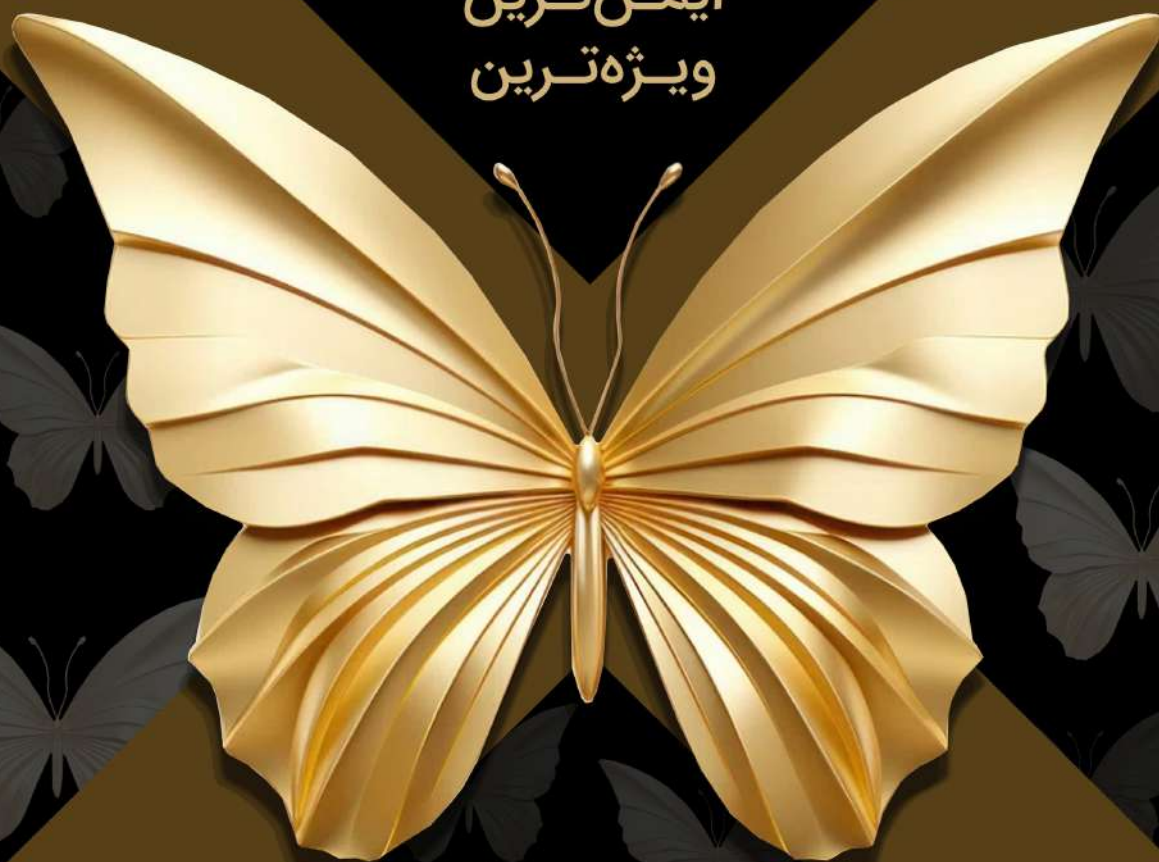

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)
aypmedical.com

ایمن و موثر بدون ایجاد عوارض جانبی

ترکیب با روش‌های پزشکی به طور گسترده‌ای استفاده شده‌اند. اگرچه معمولاً از لیزر یا نور درمانی برای اسکار آکنه به جای ضایعات فعال استفاده می‌شود اما اثربخشی و ایمنی دستگاه‌های مختلف لیزر و نور مانند PDL، لیزر دایود غیرتهاجمی nm - ۱,۴۵۰ و IPL برای درمان آکنه و لگاریس التهابی گزارش شده است چرا که به نظر می‌رسد P. acnes، PDL را از بین می‌برد و هموگلوبین انرژی لیزر را جذب می‌کند که باعث کاهش عروق و تعدیل فرآیند التهابی مربوط به آکنه می‌شود. لیزرهای غیرتهاجمی دایود nm - ۱,۴۵۰ نیز با آسیب حرارتی به غدد چربی و در نتیجه کاهش تولید سبوم بر روی آکنه و لگاریس اثر دارد. اثرات درمانی دستگاه میکرونیدلینگ RF فرکشنال (Viol) ناشی از گرم کردن بافت بوسیله انرژی RF و القای کلاژن سازی بوسیله میکرونیدل ها می‌باشد چرا که نیدلینگ پوست تکثیر و مهاجرت فیبروبلاست و کراتینوسایت ها را با القای ترشح چندین فاکتور رشد، تحریک می‌کند.

علاوه بر این، ایجاد سوراخ‌های نزدیک‌تر باعث بازسازی آرایش مجدد رشته‌های نامنظم و ضخیم کلاژن از طریق شکستگی‌های فیزیکی می‌شود که ساختار و بافت بهتر پوست را به همراه می‌آورد. به نظر می‌رسد RF فرکشنال حجم بالاتری از گرما و عمق نفوذ بیشتری را در مقایسه با دستگاه تهاجمی و غیرتهاجمی بر پایه لیزر ایجاد می‌کند. در حقیقت ترکیب اثر حرارتی بافت با استفاده از RF و القای بازسازی کلاژن بوسیله میکرونیدل ها، مزایای درمان با استفاده از این دستگاه نسبت به درمان‌های دیگر است. مهار فعالیت غدد چربی و تحریک بازسازی بافت پوست و اپیتلیال فولیکولی مکانیسم‌هایی هستند که منجر به بهبود بالینی ضایعات آکنه التهابی می‌شود.

Sang Ju Lee و همکارانش (محققان)، اثر میکرونیدلینگ RF فرکشنال در درمان آکنه و لگاریس و شرایط پوستی مرتبط با آن از جمله اسکار آکنه و منافذ بزرگ صورت را بصورت کلینیکال مورد بررسی قرار دادند. مطالعات روی ۱۸ بیمار گره‌ای (۱۵ مرد و ۳ زن) با محدوده سنی ۱۹-۳۳، میانگین سنی ۲۷ سال و تایپ پوستی IV انجام شد. این افراد مبتلا به آکنه و لگاریس با شدت متوسط تا زیاد بودند که با دو جلسه میکرونیدلینگ RF فرکشنال با فاصله ۱ ماه تحت درمان قرار گرفتند. پارامترهای درمان در این مطالعه به این صورت بود: عمق نفوذ ۳ mm میکرونیدل، شدت ۷ و زمان RF conduct (خاموش/روشن/خاموش)، ۱۰۰/۵۰۰/۱۰۰ میلی ثانیه. انرژی RF به کل صورت در دو pass اعمال شد. برای بررسی نتایج بدست آمده، عکس‌های دیجیتال با استفاده از تنظیمات، موقعیت بیمار و روشنایی یکسان در ابتدا و ۲ ماه پس از آخرین درمان گرفته شدند. دو متخصص پوست ارزیابی‌های بالینی کمی انجام دادند و با مقایسه قبل و بعد عکس‌ها نمرات ۱-۴ را به عنوان مقیاس بهبود در نظر




چهار عامل اصلی در ایجاد آکنه نقش دارند که تارگت اصلی روش‌های درمانی فعلی موجود برای آکنه و لگاریس هستند. درمان‌های دارویی مانند آنتی‌بیوتیک‌های موضعی و خوراکی، رتینوئیدهای موضعی و خوراکی پایه‌های اصلی درمان هستند، اما معمولاً نیاز به استفاده طولانی مدت دارند و می‌توانند با عوارض جانبی قابل توجهی مانند ایجاد سویه‌های مقاوم P. acnes باشند. برای درمان آکنه و لگاریس، درمان‌های غیردارویی به طور مستقل یا در

داشتند و میانگین درجه بهبود ۲/۴ بود. در هیچکدام از بیماران بدتر شدن ضایعات آکنه گزارش نشد. بررسی الگوی کلی پوست در بیماران نشان داد، دو نفر از ۱۸ بیمار درجه بهبود ۴، هشت نفر درجه بهبود ۳، هفت نفر درجه ۲ و یک نفر درجه بهبود ۱ داشتند و میانگین درجه بهبود در الگوی کلی پوست ۲/۶ بود. نتایج بدست آمده بیانگر این است که دستگاه RF میکرونیدلینگ فرکشنال می‌تواند انرژی درمانی را به بافت پوست از طریق میکرونیدل‌ها بطور ایمن و موثر بدون ایجاد عوارض جانبی (مانند سوختگی، پوسته پوسته شدن قابل توجه، اریتم طولانی مدت، PIH و اسکار) برساند. بطور کلی به دلیل ریسک کم زمان ریکاوری طولانی، ادم، اریتم طولانی مدت، هر نوع اختلال رنگی روی پوست پس از درمان و اسکار، دستگاه میکرونیدلینگ RF فرکشنال برای استفاده در بیماران آسیایی ایمن شناخته شده است.

گرفتند. (درجه ۰: بدتر شده، درجه ۱: ۰-۲۵٪ بهبود = حداقل بهبود یا حالت پایدار، درجه ۲: ۲۶-۵۰٪ بهبود متوسط، درجه ۳: ۵۱-۷۵٪ = بهبود قابل توجه و درجه ۴: ۷۶-۱۰۰٪ = نزدیک به بهبود کامل). نمرات بهبود با در نظر گرفتن تعداد، شدت و الگوی کلی ضایعات التهابی آکنه، ثبت و الگوی کلی پوست با توجه به بهبود اسکار، منافذ صورت، رنگ و بافت پوست ارزیابی شد. نمرات بهبود با در نظر گرفتن تعداد ضایعات التهابی آکنه ۲ ماه پس از آخرین درمان نشان داد که دو بیمار از ۱۸ نفر درجه بهبود ۴، هشت نفر درجه بهبود ۳، شش نفر درجه بهبود ۲ و دو نفر درجه بهبود ۱ داشتند و میانگین درجه بهبود با توجه به ارزیابی متخصصان ۲/۶ بود. در هیچکدام از بیماران بدتر شدن ضایعات آکنه دیده نشد. نمرات بهبود با در نظر گرفتن شدت ضایعات آکنه بیان کرد یکی از ۱۸ بیمار درجه بهبود ۴، هشت نفر درجه ۳، هفت نفر درجه ۲ و دو نفر درجه بهبود ۱



آکنه ولگاریس معمولی در بیمار مرد ۲۱ ساله (A) قبل و (B) ۲ ماه پس از درمان با RF فرکشنال. این بیمار درجه بهبود کلینیکی ۴ را دارد.

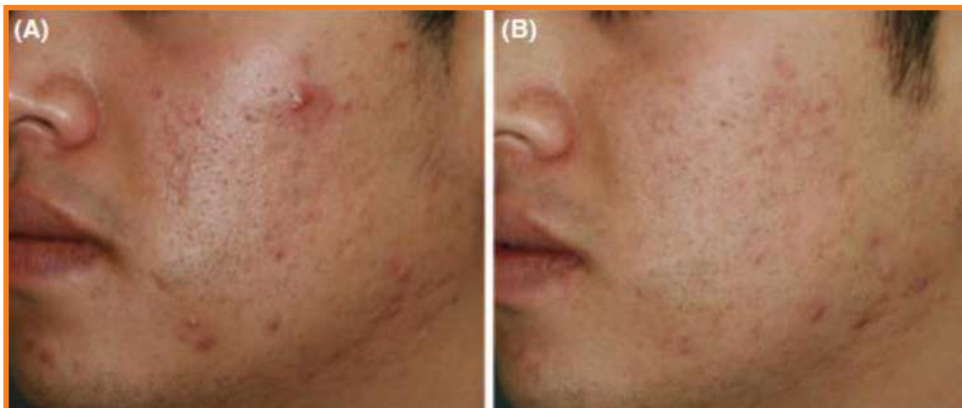

آکنه ولگاریس معمولی در بیمار آقا ۲۳ ساله (A) قبل و (B) ۲ ماه پس از درمان با RF فرکشنال. این بیمار درجه بهبود کلینیکی ۴ را دارد.



آکنه ولگاریس شدید در بیمار آقا ۲۹ ساله (A) قبل و (B) ۲ ماه پس از درمان با RF فرکشنال. این بیمار درجه بهبود کلینیکی ۲ را دارد.

کلینیک کارتون!

کیوان وارثی

با توانایی‌های منحصر به فرد دستگاه RF جوانساز سیلفرم کمپانی وایول

چرا این
پروانه‌های
زیبای طلایی
روی ما
نمی‌نشینند؟!

اگر ما هم
توانایی‌های
منحصر به فرد و ویژه
داشتیم... حتما سمت
ما هم می‌ومدن.



تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل صدر، پلاک ۱۶۹۸، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۳۰۰
info@aypmedical.com

آمی‌کویناسپارس

خبرنامه پوست و زیبایی / شماره بیست و ششم، مهر ۱۴۰۳

apararat.com/amicoyasnapars



vipdermacustomersportal.ir



aypmedical.com

